



چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در بخش آندوسکوپی

تاریخ بازدید:													
نام بخش:	سه ماهه اول			سه ماهه دوم			سه ماهه سوم			سه ماهه چهارم			توضیحات
	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	
1	کارکنان												
1-1	بهداشتی نمودن دستها در 5 موقعیت معرفی شده از سازمان جهانی بهداشت (قبل از تماس با بیمار، قبل از انجام پروسیجرهای آسپتیک، پس از مواجهه با مایعات بدن بیمار، پس از تماس با بیمار، پس از تماس با محیط اطراف بیمار) توسط کارکنان رعایت می شود.												
1-2	کوتاه بودن ناخن، عدم استفاده از لاک، ناخن مصنوعی، کاشت و زیور آلات توسط کلیه کارکنان رعایت می شود.												
1-3	پرسنلی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند از خطرات بیولوژیکی و شیمیایی ماده ی ضدعفونی کننده آگاه می باشند و رعایت می کنند.												
1-4	پرسنل از اقدامات حفاظت فردی لازم در مواقعی که مواد شیمیایی روی زمین می ریزد، اطلاع دارند.												
1-5	کارکنان واکسن هپاتیت B تزریق نموده اند و از تیتر آنتی بادی خود اطلاع دارند.												
1-6	نیروهای خدماتی بخش از نحوه ی پاک کردن ماده ضدعفونی کننده سطح بالا از روی زمین آگاهی کامل دارند.												
1-7	وسایل حفاظت فردی در دسترس بوده و از وسایل به تناسب مورد و به طور صحیح استفاده می شود.												
1-8	کارکنان از روش اجرایی مدیریت مواجهات شغلی در زمان تماس با ترشحات بالقوه عفونت زای بیمار آگاهی دارند.												
2	فرآیند شستشو و گندزدایی اندوسکوپ ها (برونکوسکوپ و پروپ TE)												
2-1	پیش شستشو، بلافاصله پس از اتمام اندوسکوپی در همان محل انجام می شود.												
2-2	پیش شستشو، پیش از جداسازی اندوسکوپ از منبع نور و ویدئو و به طور صحیح انجام می شود.												
2-3	پس از انجام پیش شستشو، اندوسکوپ در ظرف مخصوص به اتاق reprocessi ng منتقل می شود.												
2-4	تست نشستی پس از هر بار استفاده، بعد از شستشو و قبل از شروع روند reprocessi ng انجام می شود.												

چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در بخش آندوسکوپی

نام بخش:	سه ماهه اول			سه ماهه دوم			سه ماهه سوم			سه ماهه چهارم			توضیحات
	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	
۲													فرآیند شستشو و گندزدایی اندوسکوپ ها (برونکوسکوپ و پروپ TE)
۲-۵													تمامی اجزاء جدا شدنی اندوسکوپ پیش از شستشو از هم جدا می شوند.
۲-۶													اندوسکوپ و تمامی اجزاء آن به طور کامل در ماده شوینده غوطه ور می شوند.
۲-۷													در صورت استفاده از شوینده های آنزیمی، مدت زمان غوطه وری طبق دستورالعمل کارخانه سازنده رعایت می شود.
۲-۸													تمامی کانال ها با برس با سایز متناسب برس زده می شود.
۲-۹													سطوح خارجی با استفاده از یک پارچه ی نرم، اسفنج یا برس تمیز می شوند.
۲-۱۰													تمامی کانال های قابل دسترسی فلاش محلول شوینده آنزیمی می شوند.
۲-۱۱													برای سهولت دسترسی ماده شوینده به تمامی سطوح ، دریچه ها به صورت مکرر در حین شستشو باز و بسته می شوند.
۲-۱۲													پس از هر بار برس زدن، بقایای واضح جدا شده و برس با محلول شستشو تمیز می شود.
۲-۱۳													کیفیت فرایند پاکسازی ابزار و تجهیزات به صورت تصادفی با استفاده از تستهای موجود و رایج پایش می گردد.
۲-۱۴													پس از شستشوی هر دستگاه، سینک بوسیله یک شوینده خانگی تمیز می شود.
۲-۱۵													تجهیزات جانبی ترجیحا یکبارمصرف استفاده شود و در صورت چند بار مصرف بودن تجهیزات فوق مانند فورسپس، بیوبسی و سایر تجهیزات برش دهنده (که سد مخاطی را می شکنند) پس از تمیز کردن، استریل می شوند و ضد عفونی سطح بالا کافی نیست.
۲-۱۶													تجهیزات جانبی چند بار مصرف اندوسکوپی که سد مخاطی را نمی شکنند، ضد عفونی سطح بالا می شوند.
۲-۱۷													ماده ضد عفونی کننده ی استفاده شده دارای تاییدیه واحد کنترل عفونت می باشد.
۲-۱۸													زمان غوطه وری در ماده ضد عفونی کننده سطح بالا طبق دستور شرکت سازنده رعایت می شود.

چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در بخش آندوسکوپی

نام بخش:	سه ماهه اول			سه ماهه دوم			سه ماهه سوم			سه ماهه چهارم			توضیحات
	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	
۲	فرآیند شستشو و گندزدایی آندوسکوپ ها (برونکوسکوپ و پروپ TE)												
۲-۱۹	قبل از شروع فرآیند آماده سازی آندوسکوپ از وسایل حفاظت فردی استفاده می شود. گان ضد آب با آستین بلند (که برای هر بیمار تعویض شود)، دستکش ضخیم و بلندی که ساعد را بپوشاند، عینک ایمنی برای پیشگیری از آسیب و آلودگی چشم و ماسک صورت مناسب برای کاهش تنفس بخارات محلولها.												
۲-۲۰	در مرحله ضد عفونی دستی آندوسکوپ و تمام اجزاء آن در ماده ضد عفونی کننده سطح بالا غوطه ور می شوند و ماده ی ضد عفونی کننده در کانال ها جریان می یابد.												
۲-۲۱	کانال سیم بالا برنده آندوسکوپ همیشه به صورت دستی ضد عفونی می شود.(حتی در صورت استفاده از آندوسکوپ شوی خودکار)												
۲-۲۲	پس از اتمام ضد عفونی، آندوسکوپ به طور کامل آبکشی شده و تمام کانال ها با آب فلاش می شود تا محلول ضد عفونی کننده پاک شود.												
۲-۲۳	پس از اتمام آبکشی در صورت استفاده از آب غیر استریل (آب شیر یا فیلتر شده) کانال ها با الکل ۷۰٪ فلاش می شوند.												
۲-۲۴	پس از انجام الکل فلاش، با استفاده از هوای فشرده، دستگاه خشک می شود.												
۲-۲۵	آندوسکوپ های reprocess شده در اتاقی تمیز و با تهویه مناسب قرار دارند.												
۲-۲۶	آندوسکوپ های reprocess شده به صورت عمودی آویزان می شود.												
۲-۲۷	کابینت باید از جنس قابل شستشو بوده و حداقل یکبار در هفته شسته و ضد عفونی شود.												
۲-۲۸	دریچه ها و اجزاء جدا شونده به آندوسکوپ های reprocess شده متصل نیستند.												
۲-۲۹	بطری آب که برای تمیز کردن لنزها و شستشوی حین آندوسکوپی استفاده می شوند و همچنین تیوب متصل شونده به آن، حداقل روزانه استریل اتوکلاو یا ضد عفونی سطح بالا می شود.												
۲-۳۰	برای پر کردن بطری آب از آب استریل استفاده شده و پس از هر نوبت آندوسکوپی، آب تعویض می شود.												
۲-۳۱	تاریخ مصرف و انقضاء ماده ی ضد عفونی کننده روی ظروف ها ثبت شده است.												

چک لیست ارزیابی دوره ای کنترل عفونت در بخش آندوسکوپی

موارد قابل ارتقاء در بازدید چهارم	موارد قابل ارتقاء در بازدید سوم	موارد قابل ارتقاء در بازدید دوم	موارد قابل ارتقاء در بازدید اول

مهر و امضاء مسئول فنی بیمارستان / سوپروایزور شیفت

مهر و امضاء سرپرستار / اینچارج

مهر و امضاء ارزیاب دوم

مهر و امضاء ارزیاب اول